

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

① PEBBELL 2 WATERPROOF



② LAITTEEN LATAAMINEN

Pebbell 2 Waterproof paikannuslaite on varustettu ladattavalla akulla. Akun kesto voi vaihdella riippuen GPS and GSM sensoreiden aktiivisuudesta.

- Kun lataat laitetta ensimmäisen kerran, lataa akkua 3-4 tuntia käyttäen USB-laturia tai lataustelakkaa. Näin varmistat akun maksimaalisen käyttöiän.
 - Aseta laite lataustelakkaan.
 - Yhdistä Micro USB-kaapeli lataustelakkaan ja kytke laturi pistoraasiaan. Voit ladata laitetta myös suoraan Micro USB-kaapelilla (liitin laitteen sivussa).
 - Kun laite ladataan lataustelakassa, punainen LED-valo vilkkuu himmeästi. Kun laite on ladattu täyteen, punainen LED-valo palaa himmeästi.

HUOM! Väärä latauslaite voi vahingoittaa laitetta. Käytä ainoastaan Pebbell 2 Waterproof-laitteelle tarkoitettua laturia. Optimaalinen latauslämpötila laitteen lataamiseen on +10° C and +30° C. Akun käyttöikä voi lyhentyä jos lataat laitetta muissa lämpötiloissa.

③ LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

- Paina ja pidä pohjassa sivussa olevaa virtanappia, kaikki LED-valot välähtävät nopeasti. Laite voidaan kytkeä päälle myös automaattisesti kytkemällä laite lataustelakkaan tai kytkemällä laite Micro USB-kaapelilla laturiin.
- Saadaksesi paikkatiedon, vie laite ulos tai sijoita ikkunan läheisyyteen.



④ LAITTEEN SAMMUTTAMINEN

- Paina ja pidä pohjassa sivussa olevaa virtanappia ja päällä olevaa SOS-nappia yhden sekunnin verran kunnes LED-valot sammuvat.

⑤ MITÄ LED-VALOT TARKOITTAVAT

VIRTATILA - LED

LED	SININEN (PALAA JATKUVASTI)	SININEN VILKKUU NOPEASTI	SININEN EI PALA TAI VILKKUU HITAASTI
TILA	LAITE ON LATAUKSESSA	AKUN VARAUSTILA ALLE 15%	AKKU TÄYNNÄ TAI LAITE EI OLE LATAUKSESSA

GSM LED - VIHREÄ

LED	LED VILKKUU KERRAN KOLMEN SEKUNNIN VÄLEIN NOPEASTI	LED VILKKUU KAKSI KERTAA NOPEASTI KOLMEN SEKUNNIN VÄLEIN	LED VILKKUU HITAASTI KOLMEN SEKUNNIN VÄLEIN	LED PALAA KOKO AJAN
TILA	LAITE ON YHTEYDESSÄ GSM-VERKKOON	LAITE ON GPRS-VERKOSSA	LAITE ETSII VERKKOA (YHDISTYMÄSSÄ)	SIM-KORTTIA EI HAVAITTU


GPS LED - SININEN

LED	LED VILKKUU KERRAN KOLMEN SEKUNNIN VÄLEIN NOPEASTI	LED PALAA SEKUNNIN KOLMEN SEKUNNIN VÄLEIN	LED EI PALA (KUN LAITE EI OLE LATAUKSESSA)
TILA	LAITE ON YHTEYDESSÄ SATELLIITTEIHIN	LAITE EI YHTEYDESSÄ SATELLIITTEIHIN	GPS-SIRU ON LEPOTILASSA

⑥ NUMEROIDEN ASETTAMINEN

1. Esiasetettujen numeroiden linkittäminen laitteeseen

① Läheta viesti: **A1** tai A1, matkapuhelinnumero

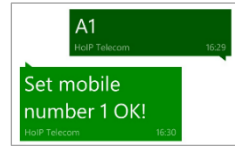

HUOM: Ei välejä viestissä, kirjainkoolla on merkitystä

❖ Käyttäessäsi omaa matkapuhelinta, lähetä viesti **A1** laitteessa olevaan numeroon, Laite vastaa: **Set mobile number 1 OK!**

Poistaaksesi numeron, lähetä viesti **A0** laitteessa olevaan numeroon .

HUOM: Laitteeseen voit linkittää max. kolme matkapuhelinnumeroa. Vähintään yksi matkapuhelinnumero täytyy olla asennettuna.

② Läheta viesti: B1 tai **B1, matkapuhelinnumero** (Esim: B1,+358400123456)

❖ Käyttäessäsi matkapuhelinta, esim. lähetä B1,+358400123456 laitteessa olevaan numeroon. Laite vastaa: **Set mobile number 2 OK!**

Poistaaksesi numeron, lähetä viesti **B0**

③ Läheta viesti: C1 tai **C1, matkapuhelinnumero** (Esim: C1,+2584001123456)

❖ Käyttäessäsi matkapuhelinta, esim. lähetä viesti C1,+358400123456 laitteessa olevaan numeroon. Laite vastaa: **Set mobile number 3 OK!**

Poistaaksesi numeron, lähetä viesti **C0**

⑦ SOS-HÄLYTYS

Paina ja pidä pohjassa SOS-nappia kolme sekuntia kunnes laite värähtää.

Vihreä LED-valo alkaa vilkkumaan nopeasti. Laite lähettää "Help me" – tekstiviestin ja paikkatietokoordinaatit linkitettyihin puhelinnumeroihin (max. 3 kpl).

Sen jälkeen laite soittaa linkitettyihin puhelinnumeroihin. Laite aloittaa soittamisen ensimmäiseen linkitettyyn numeroon (A1). Jos ensimmäisestä numerosta ei vastata, laite soittaa toisessa muistipaikassa olevaan numeroon (B1). Jos toinen numero ei vastaa, laite soittaa kolmannessa muistipaikassa olevaan numeroon (C1).

Jos yhdestäkään numerosta ei vastata, laite aloittaa uuden soittokierroksen n. viiden minuutin kuluttua. Laite soittaa tallennettuihin numeroihin kunnes jostakin numerosta vastataan.

Lopettaaksesi SOS-puhelun, paina SOS-nappia.



⑧ PUHELUN SOITTAMINEN

Soittaaksesi tavallisen puhelun, paina ja pidä pohjassa sivussa olevaa puhelunappia kolme sekuntia (kuulet piippauksen).

Vihreä LED-valo alkaa vilkkumaan nopeasti ja laite soittaa tavallisen puhelun **KOLMANESSA** muistipaikassa olevaan numeroon (**C1**).

HUOM. (Ennen 4/2016 ostetuissa PEBBELL 2 WATERPROOF-laitteissa puhelu yhdistyy ENSIMMÄISESSÄ muistipaikassa olevaan numeroon)

Lopettaaksesi puhelun, paina päällä olevaa SOS-nappia.

⑨ PAIKKATIEDON HAKEMINEN TEKSTIVIESTILLÄ

1. Vastaus koordinaateilla ja web-linkillä


Lähetä viesti: **LOC**

Laite vastaa

"GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx and a link to google map:

maps.google.com/maps?q=48.148876,11.542431

Klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä paikkatieto näkyy puhelimesi Google Mapsissa (Puhelimessa pitää olla internetyhteys päällä).

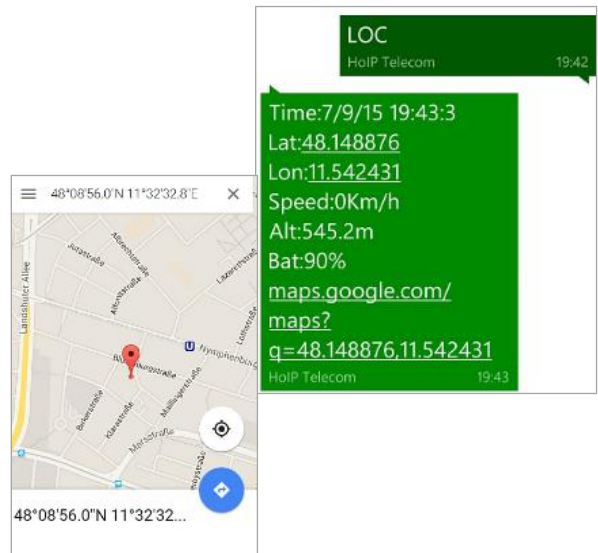

① - ② -MITEN ALOITAN LAITTEEN KÄYTÖN

1. Lataa Pebbell 2 Waterproof akkua 3-4 tuntia.
2. Lähetä omasta matkapuhelimestasi viesti **C1** laitteessa olevaan numeroon. Laite vastaa: **Set mobile number 3 OK!**

GPRS-yhteys päällekytkeminen

Lähetä viesti: **S2** (asettaa laitteesta GPRS-yhteyden päälle) – Laite vastaa "GPRS ON"

Valitse aikaväli paikannukselle

Lähetä viesti: **Mode5,15M** Laite lähettää paikkatietoa 15 min. välein

Mode5,30S Laite lähettää paikkatietoa 30 sekunnin välein

Mode5,30M Laite lähettää paikkatietoa 30 minuutin välein

Mode5,03H Laite lähettää paikkatietoa 3 tunnin välein

Sulkeaksesi GPRS-yhteyden, lähetä viesti **S0**

Alla lista laitteen ominaisuuksista. Ohjeet löytyvät täydellisestä käyttöohjeesta.

AKUN ALHAISEN VARAUSTASON HÄLYTYS	LAITTEEN LUKITSEMINEN
ALUERAJAHÄLYTYS	YLIINOPEUSHÄLYTYS
LIIKEHÄLYTYS	
KAATYMISEN HÄLYTYS	KUUNTELU
GPS-SIGNAALIN KATOAMISHÄLYTYS	AKUN VIRRANSÄÄSTÖTILAT
SIM-KORTIN KÄYTTÖKUSTANNUKSET	TAKUU 12 kk
SEURANTAPALVELU-LIVE WEB TRACKING	APP-SOVELLUS PUHELIMELLE (LISENSSI) <ul style="list-style-type: none">• Android VALMIS• IOS kehitystyön alla

Pebbell SIM EU Profile⁴

Hinnat	SMS/kpl	Data ¹	Puhe ²	kk-maksu ³
ALV 0%	0,1444€	0,1444€	0,1444€	2,0€
ALV 24%	0,1790€	0,1790€	0,1790€	2,48€

1 Hinta / 1 Mt

2 Hinta / 1 min. puhelu

3 Sim-kortin kuukausimaksu,

4 Voit käyttää Pebbell 2 Waterproof paikannuslaitetta huoletta yli 30 maassa Euroopassa ilman lisäkuluja.

Seurantapalvelu www.tracking.pebbell.com (vaatii tunnukset)

App-sovellus (Android) <http://www.pebbell-gps.com/mobile-download>

Mobicare Oy ei ole vastuussa laitteen väärinkäytöstä!