

KAUNILA HEVOSILLE AKTIIVISUUSMITTAUKSEN KÄYTTÖOHJE

Kaunila

1. Asenna sovellus

Asennetaan sovellus Play Storesta tai App Storesta.

2. Aktivoi sensori

Paina sensorin nastoja peukaloilla hetken aikaa. Aktivoi sensori ravistamalla.

HUOM: Pidä laite asennuksen ajan liikkeessä. Sensori menee virransäästötilaan 2 min paikallaolon jälkeen

3. Sovelluksen käyttöönotto

Avaa Kaunila hevosille sovellus.

Valitse kieli

Lue ohjeteksti ja paina yhdistä

Valitse sensori. Riippuen puhelimestasi se löytyy joko MAC osoitteella, eli sarja numeroita ja kirjaimia tai nimellä Kaunila smart sensor. Laitteen MAC osoitteen löydät ostopakkauksen sisäpuolelta.


Nimeä sensori.

Sovellus siirtää tallennetut tiedot --> Kalenteri aukeaa.


4. Laita sensori pantaan ja panta hevoselle!

Aktiivisuusmittauksen käyttö:

Kaunila aktiivisuussovelluksen käyttö ja lukeminen on helppoa. Siinä on kolme päänäkymää: lataa-, kalenteri- ja vuorokausinäkymä. Sen lisäksi mukana on asetukset- näkymä.

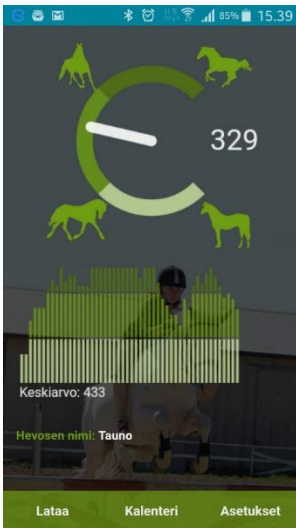

Lataa- näkymässä näet, mikä on tämänhetkisen aktiivisuuden taso. Voit seurata, mitä erilaiset liikkeet tarkoittavat sovelluksen näytöllä ja ladata aktiivisuus sensoriin tallentuneet tiedot.

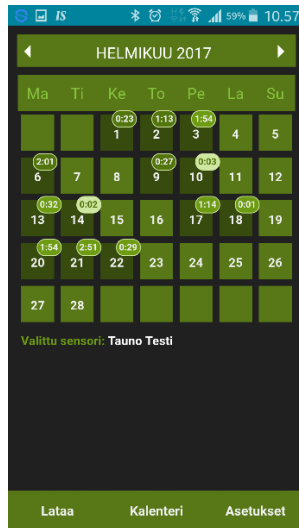


Kalenterissa voit verrata kunkin päivän aktiivisuutta ja siirtyä vuorokausinäkymään.



Vuorokausinäkymä näyttää yhden päivän kaiken aktiivisuuden ja sen, miten aktiivisuus on jakautunut eri tuntien välille.

Aktiivisuus sensorin muistiin tallentuu kaikki aktiivisuusdata hevosin liikkeistä. Suositeltava tietojen sovellukseen siirtämisen enimmäisväli on noin 5 päivää. Tällöin muisti ei ehdi täyttyä ja kaikki data tallentuu.

Aktiivisuus sensorin toimii tavallisella CR 2025- paristolla. Voit vaihtaa sen itse. Kun panta likaantuu, poista aktiivisuus sensorin ennen pesua. HUOM! Sensorin sisällä on paristo valmiina toimitettaessa.

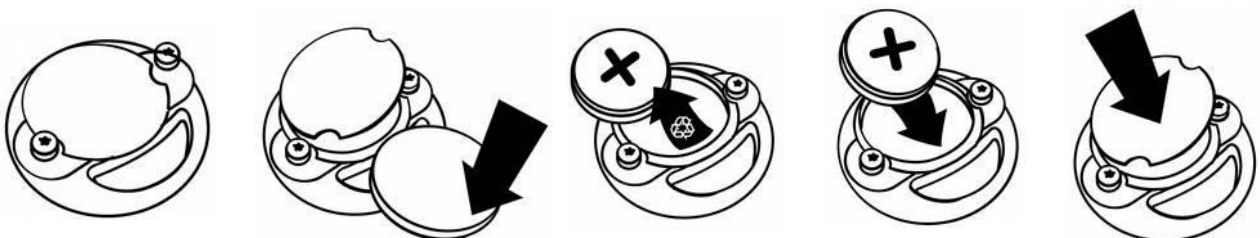

VAROITUS: VAIN VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN

HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTINAINEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTA A LAITTEEN PINTAA.

HUOMIO:ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISKARKOTTEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTA A LAITTEEN PINTAA.

HUOMIO: ÄLÄ HÄVITÄ LAITETTA TAVALLISENA JÄTTEENÄ VAAN KÄSITTELE SE ELEKTRONIIKKAJÄTTEENÄ YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI.

HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA ISKUILLE TAI PUDOTA SITÄ, JOTTA LAITE EI VAHINGOITU.

HUOMIO: VAARATILANTEIDEN VÄLTÄMISEKSI, HUOLEHDI, ETTÄ PANTA ON HYVIN KIINNITETTY JA ETTÄ ESIMERKIKSI TOINEN KOIRA EI PÄÄSE VÄÄNTÄMÄÄN TAI LAITTAMAAN PÄÄTÄÄN PANNAN SISÄÄN.

- Aktiivisuussensorin paino: 9,4 g (paristoineen)
- Halkaisija: 36,5 mm
- Paksuus: 8 mm
- Käyttölämpötila: -20 °C – +60 °C
- Varastointilämpötila: -30 °C – +60 °C
- Vesitiiviys: 30 m (standardin ISO 6425)
- Pariston tyyppi: CR2025
- Pariston käyttöaika: - 500 tuntia
- Lähetytaajuus: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

7.2 Vaatimustenmukaisuus

7.2.1 CE

Kaunila Oy vakuuttaa, että tämä tuote täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

7.3 Patentti-ilmoitus

Tätä tuotetta suojaavat seuraavat patentit ja vireillä olevat patenttihakemukset sekä niitä vastaavat kansalliset oikeudet: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281. Lisäpatenttihakemuksia on vireillä.

7.4 Tavaramerkki

Kaunila, sen logot, ja muut Kaunila-brändin tavaramerkit ovat Kaunila Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään Suunto Smart Sensor, sen logot ja muut Suunto-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet on rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

7.5 Takuu

Kaunila takaa, että tämän rajoitetun takuun mukaisesti Kaunila tai Kaunilan valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.

Takuuaika

Rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä. Tuotteiden takuuaika on yksi vuosi.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei koske

1. a) tavallista kulumista, kuten naarmuja, hankaumia tai muidenkuin metallihihnojen värin ja/tai materiaalin muutosta, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja, eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat käyttötarkoituksen tai ohjeiden vastaisesta käytöstä, virheellisestä hoidosta, laiminlyönneistä ja onnettomuuksista, kuten pudotuksesta tai musertumisesta,
2. painettua aineistoa ja pakkauksia,
3. vikoja tai väitettä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Kaunilan valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa
4. Paristoja

Kaunila ei takaa tuotteen käytön keskeytyksttömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa. Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos:

1. tuotteen tai lisävarusteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti, 2. tuotteen tai lisävarusteen korjaukseen on käytetty muita kuin valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoilike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen,
3. tuotteen tai lisävarusteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi jollain tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot, tai
4. tuote tai lisävaruste on altistunut kemikaaleille, muun muassa aurinkovoiteelle ja hyttyskarkotteille.

Takuuhuollon saatavuus

Takuuhuoltoa varten täytyy esittää tuotteen ostotosite. Takuupalvelun käyttöohjeet ovat osoitteessa www.kaunila.fi/warranty. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Kaunila-jälleenmyyjään tai Kaunila asiakaspalveluun.

Vastuunrajoitus

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä rajoitettu takuun ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Kaunila ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönneistä, törkeästä oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Kaunila olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaunila ei ole vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.

7.6 Tekijänoikeudet

Copyright Kaunila Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaunila, Kaunila-tuotteiden nimet, niiden logot ja muut Kaunila-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet ovat rekisteröityjä tairekisteröimättömiä Kaunila Oy:n tavaramerkkejä. Tämä käyttöohje sisältöineen on Kaunila Oy:n omaisuutta. Se sisältää Kaunila- tuotteiden käyttöön liittyviä tietoja ja on tarkoitettu yksinomaan Kaunila-tuotteiden käyttäjille. Sisältöä ei saa käyttää, jakaa, välittää, kopioida eikä jäljentää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman Kaunila Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Olemme pyrkineet huolellisesti varmistamaan tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen selkeyden ja tarkkuuden. Mitään tarkkuutta koskevia suoria tai epäsuoria takuita ei myönnetä. Tämän asiakirjan sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Tämän asiakirjan viimeisin versio on ladattavissa osoitteessa www.kaunila.fi